



LEUKOMED® CONTROL

Il chiaro controllo della ferita

Leukoplast®
Wound care in best hands

LEUKOMED® CONTROL

il chiaro controllo del rischio

L'ispezione costante delle ferite riveste un ruolo importante nella lotta alle infezioni del sito chirurgico. Gli esperti LEUKOPLAST® hanno combinato **la tecnologia idropolimerica altamente innovativa con le pellicole LEUKOPLAST®** più protettive e trasparenti. Grazie alla straordinaria trasparenza della pellicola e del cuscinetto idropolimerico, **l'ispezione delle ferite** e il rilevamento precoce delle infezioni è agevole in qualsiasi momento - **senza bisogno di sostituire la medicazione.**



*Pellicola ultrasottile e adattabile
per una sensazione di seconda pelle*



Particolarmente trasparente con bassa frizione e superficie opacizzata

La medicazione è a malapena visibile sulla pelle

- Elevato comfort per i pazienti

Barriera sterile

Protegge in modo affidabile contro acqua, batteri e contaminanti

- Riduce il rischio di ISC

Altamente traspirante e adattabile

Impedisce la macerazione della cute e le vesciche da attrito.

Si adatta rapidamente alla flessione e all'edema della cute grazie al bordo adesivo affidabile e delicato sulla pelle

- Assicura un comfort elevato anche in aree del corpo dal profilo ondulato

Eccellente adesione

Offre una presa delicata ma efficace

- Elevata adattabilità al paziente

Cuscinetto idropolimerico sottile

Per un'eccellente gestione dell'essudato

Mantiene la ferita pulita e pronta per l'epitelizzazione

- Assicura un livello di umidità ottimale della ferita e della cute circostante
- Offre condizioni di guarigione ideali



Composizione completamente trasparente

Comodo controllo visivo

- Rapido rilevamento dei primi segnali di possibili infezioni
- Rassicura paziente e infermiere circa il progresso terapeutico

Minor numero di sostituzioni della medicazione

- Meno sforzo, costo e tempo
- Meno stress sulla pelle

LEUKOPLAST®


Consigli dell'esperto

Lo speciale design dei cuscinetti idropolimerici di Leukomed® Control consente al paziente di riacquistare la piena mobilità, grazie allo spazio presente tra i vari cuscinetti che proteggono la ferita. In questo modo la medicazione è altamente flessibile sia in senso longitudinale sia in quello laterale.


LEUKOMED® CONTROL

Tecnica di applicazione unica


La semplice applicazione passo a passo permette il posizionamento preciso e la rapida protezione della ferita

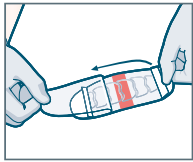


1. Rimuovere la pellicola trasparente inferiore per esporre la superficie adesiva.

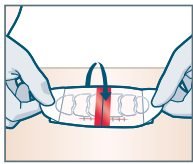


2. Tenere la pellicola tramite gli applicatori e applicarla con la compressa in gel rivolta verso la ferita.

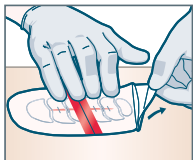

3. Rimuovere gli applicatori. Quindi fare una leggera pressione così che i margini adesivi si fissino alla cute senza creare pieghe.

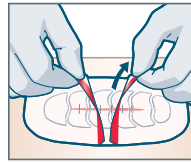

4. Rimuovere con delicatezza la pellicola protettiva superiore sollevando dai margini rossi.

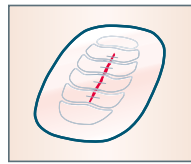

5. Ispezionare la ferita frequentemente senza rimuovere la medicazione.



Per la corretta applicazione di Leukomed® Control, è possibile fare riferimento al nostro video esplicativo.



Indicazioni

Leukomed® Control è indicato per ferite acute asciutte o poco essudanti come incisioni chirurgiche, ustioni superficiali o di secondo grado, siti di donazione di pelle, lacerazioni e abrasioni.

Raccomandazioni: è particolarmente adatto per il controllo delle ferite in pazienti soggetti ad elevato rischio di infezione.

Gamma disponibile

Leukomed® Control				
Misura		Codice	Unità di vendita	Imballo di magazzino
5 cm x 7 cm		7323000	10	28 confezioni
7 m x 10 cm		7323001	10	20 confezioni
8 m x 15 cm		7323002	10	20 confezioni
10 m x 24 cm		7323003	5	20 confezioni
10 m x 35 cm		7323005	5	10 confezioni

Essity Italy S.p.A.

Sede Commerciale: Via Salvatore Quasimodo 12, 20025 LEGNANO (MI)
Sede Legale: Via XXV Aprile 2, 55011 BADIA POZZEVERI - ALTOPASCIO (LU)

essity